



BACTIDYN[®] SPRAY

DÉSINFECTANT PRÊT A L'EMPLOI

BACTIDYN SPRAY PE désinfectant Prêt a l'emploi est utilisé pour la désinfection par voie aérienne journalière et préventive (dispersats dirigés, diffuseurs) des surfaces générales et des équipements, matériels, en particulier de blocs opératoires, dispositifs médicaux non invasifs. **BACTIDYN[®] SPRAY PE** s'utilise sans dilution.

— ACTIVITES

BACTERICIDE : conforme normes européennes NF EN 1040, NF EN 1276 conditions de salete et normes AFNOR NF T 72-151 spectre 5 et NF T 72-190. Actif sur Staphylococcus aureus multi-resistant. EN 13727 **FONGICIDE** : conforme aux normes européennes NF EN 1275, NF EN 1650 conditions de salete sur Candida albicans. **LEVURICIDE** : EN 13624. **SPORICIDE** : EN 13704 sur Bacillus Subtilis et Clostridium difficile **VIRUCIDE** Rotavirus, Poliovirus, Adenovirus, Herpes virus, selon la methodology de la norme AFNOR NF T 72-180. EN 14476 sur PRV, BVDV, H1N1, (conditions de salete — 2% — 5 min — 20°C) Herpes, Vaccinia virus, Rotavirus (conditions de salete — 0.5% — 5 min — 20°C), Norovirus (conditions de salete — 2% — 15 min — 20°C), HIV (conditions de salete — 2% — 60 sec — 20°C)

— COMPOSITION

PEROXYDES - AMMONIUMS QUATERNAIRES SYNERGISES - ETHANOL - TERPINEOL - EXCIPIENTS

— CARACTERISTIQUES

*Aspect : Liquide *Odeur : Résineux *Couleur : Legerement ambre	*Conservation : tenir à l'abri de la lumière et à une température supérieure à 4°C	*Incompatibilité : ne pas mélanger avec des produits anioniques ou chlorés
*pH du produit Prêt à l'emploi : 10±1		*Peremption : > 4 ans

— TOXICOLOGIE

- * DL 50 : 6,95 ml/kg < DL 50 < 8,33 ml/kg
- * Test d'irritation oculaire : produit considers comme non irritant.
- * Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée, même lors d'usages répétés.

— INDICATION

BACTIDYN SPRAY PE s'utilise pour la désinfection de tous types de locaux après nettoyage et pour la décontamination des endroits peu accessibles.

BACTIDYN SPRAY PE s'utilise pour la désinfection rapide de toutes surfaces.

BACTIDYN SPRAY PE est sans risque ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement.

BACTIDYN SPRAY PE peut Être utilisé avec un appariel a dispersats dirigés ou en diffuseur.

— PROTOCOLE D'UTILISATION

Bien agiter. Pulvériser au moyen d'un appareil électrique. Le local est réutilisable apres 15 minutes (temps de séchage du produit).

— AVANTAGES

Inflammable: teneur en alcool < 5%. Sans aldéhydes, sans chlore, sans phénol. Non corrosif: compatible avec caoutchouc, plastique, inox, verre, céramique, silicone, PVC, plexiglas. Non volatils, non irritants: sans danger pour l'homme et pour l'environnement. Stabilité a la température (75° C et plus) et dans le temps (péremption 4 ans).

— PRECAUTIONS D'EMPLOI (CF. FDS)

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas avaler.
Rincer a l'eau claire en cas de projection sur les muqueuses.
Ne pas vaporiser pres d'une flamme ou d'une source de chaleur ou électrique.

— PRÉSENTATION

Références : References : Bidon de 5 litres
Flacon Pulverisateur de 1 litre
Flacon Pulverisateur de 750 ml



Fabricant Exploitant et distribution : **PHI (PRODHYG IND)**

TEL: 98 314 510 - FAX: 70 691 123 / 70 727 452

✉ prodhyg@yahoo.fr 🌐 www.prodhyg.net

